



SAFETY AT WORK

Plum BodyNeutrAll

Ducha corporal móvil con una solución de descontaminación altamente eficaz para la piel, las superficies y la ropa.

Para una descontaminación rápida y eficaz de personas y superficies en contacto con sustancias peligrosas corrosivas y tóxicas, tales como ácidos y bases fuertes, oxidantes, formaldehído, fenoles, disolventes orgánicos, ácido fluorhídrico y fluoruros.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Para primeros auxilios tras el contacto con sustancias peligrosas directamente en el lugar del accidente
- Efecto muy rápido
- Fácil manejo
- Para la descontaminación de varias personas o áreas de hasta 50 m² -dependiendo de la variante-
- Vida útil: 3 años a partir de la fecha de fabricación

DISPONIBLE EN 3 TAMAÑOS

- 5 l: adecuado para áreas grandes de hasta 50 m² y para varias personas
- 600 ml: fácil de usar en áreas más pequeñas de hasta 6 m² o para hasta 3 personas
- 100 ml: tiene un tamaño de bolsillo para llevarlo contigo y cubre aproximadamente 1 m² o la longitud de un brazo

PLUM BODYNEUTRALL DEBE SU EFICACIA, ENTRE OTRAS, A ESTAS SUSTANCIAS:

- Ácido ascórbico para neutralizar (mediante una reacción redox) sustancias fuertemente oxidantes como el peróxido de hidrógeno, el bromo elemental, la lejía clorada, el hipoclorito de calcio, los gases nitrosos, los nitratos y muchas otras
- Tampón de aminoácidos para neutralizar ácidos y álcalis como el ácido sulfúrico, la sosa cáustica, el ácido nítrico o el ácido clorhídrico
- El aminoácido glicina para fijar el formaldehído y los fenoles
- Cloruro de calcio para la precipitación del fluoruro en forma de fluoruro de calcio insoluble, lo que también inactiva el ácido fluorhídrico
- Además, polietilenglicol y glicerol como solubilizantes para sustancias químicas orgánicas

AUTORIZACIONES/HOMOLOGACIONES DE LA SOLUCIÓN DE DESCONTAMINACIÓN:

- Certificación como producto sanitario de clase I, de conformidad con los requisitos del Reglamento (UE) 2017/745
- Registrado oficialmente por la Oficina Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios con el número DE/CA32/00149466. El registro es válido para toda la UE y puede llevar el marcado CE correspondiente
- Cumple con la norma DIN 14555-12 para carros de transporte de mercancías peligrosas



No utilice el producto en los ojos, en las membranas mucosas ni en la piel lesionada. No lo utilice en caso de accidentes con ácido sulfúrico concentrado. En caso de contacto, enjuague con agua o con una solución de lavado estéril.



N.º de artículo	4735	4736	4737
Tamaño	5 L	600 ml	100 ml

Calificado dermatológicamente como «muy bueno». Sin incompatibilidades tóxicas ni irritantes.

info@plum.eu
+45 6916 9600